

機械器具 47 注射針及び穿刺針
 管理医療機器 軟組織生検キット(16835010)
サンキョー組織採取針セット

再使用禁止

【禁忌・禁止】


- ・ 再使用禁止
- ・ 再滅菌禁止
- ・ 子宮頸管に感染症がある患者への使用
- ・ 使用前の滅菌包装に破損、水漏れ等の異常が認められる場合には使用しないでください。

【形状・構造及び原理等】

1. 構成

本品は、吸引用針、接続チューブで構成され、針管を保護するプロテクタ及びカヌラ針が付属する。

※※①吸引用針

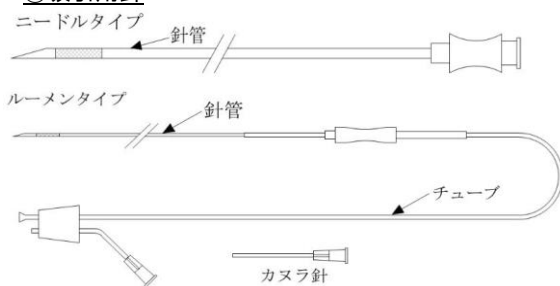


針管 単位：mm

	内径	外径	長さ
18G	0.90	1.26	300, 310, 320, 350
	0.94	1.24	
19G	0.686	1.067	
	0.75	1.05	
20G	0.60	0.91	300, 320, 350
	0.63	0.89	
21G	0.51	0.81	
	0.55		

チューブ 単位：mm

	内径	外径	長さ
18G	1.10, 1.25	2.00, 2.60	300, 600, 800, 1000
19~21G	1.00, 1.10		

※※②接続チューブ

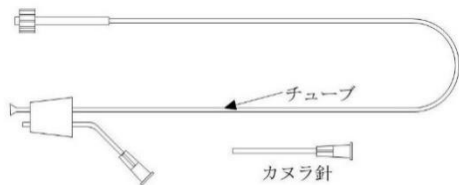

チューブ 単位：mm

	内径	外径	長さ
18G	1.10, 1.25	2.00, 2.60	200, 300, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1500, 1800, 2000
19	1.00, 1.10, 1.25		
~21G			

2. 主な原材料

吸引用針管	ステンレス SUS304 又は SUS321
接続チューブ	ポリ塩化ビニル(可塑剤：ジ(2-エチルヘキシル)フタレート)又はシリコン又は12ナイロン

【使用目的又は効果】

検査、治療又は診断のため、人体に穿刺し、組織を採取する。

【使用方法等】

1. 使用前

- ①患者を砕石位の体位にて膣鏡を用いて内診を行い、子宮頸部(前屈・後屈の角度)を確認後、吸引用針を挿入する長さを決定して下さい。
- ②外陰部及び膣内を滅菌生理食塩水等で洗浄清拭して下さい。
- ③必要に応じて吸引用針と接続チューブ及び吸引用器具を接続して下さい。

2. 使用方法

- ①針管を膣内に挿入後、卵胞に穿刺して下さい。
- ②スタイレットを使用している場合は、スタイレットを取り除いて下さい。

③卵子を採取して下さい。

吸引用器具を使用する場合は以下のように行って下さい。

(ポンプ使用)

シリコン栓で回収容器に栓をし、附属しているステンレス管にシリンジ、又はポンプを接続して、回収容器を真空にすることにより卵子を採取して下さい。

(シリンジ使用)

チューブと繋がっているステンレス管とシリンジを接続させ、シリンジで吸引することにより卵子を採取して下さい。

(付属カヌラ針使用)

ポンプ使用時、シリコン栓に接続されたチューブ先端部より生理食塩水を注入する場合、カヌラ針をチューブ先端部に挿入しシリンジを接続して下さい。

3. 使用後

採取後に抜去し、必要な場合は、止血を行って下さい。

【使用上の注意】

1. 製品に無理に力を加えたり、加工したりする作業はやめて下さい。
2. 子宮頸管内及び子宮腔内で抵抗を感じたときは、決して無理に押し進めないで下さい。(出血や子宮内膜損傷などの有害現象が起こる可能性があります。)
3. ポリ塩化ビニルの可塑剤が溶出する可能性があります。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

水漏れに注意し、高温・多湿な場所及び直射日光を避けて、清潔な状態で保管して下さい。

2. 有効期間

使用の期限は製品ラベルに記載(自己認証による)

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社サンキョーメディック
 電話番号 (0545)23-0678