

機械器具 51 医療用嘴管及び体液誘導管
一般医療機器 精液注入用子宮カテーテル (34077000)

サンキョー I U I カテーテル

再使用禁止

【禁忌・禁止】


- ・再使用禁止
- ・再滅菌禁止
- ・子宮頸管に感染症がある患者への使用
- ・使用前の滅菌包装に破損、水漏れ等の異常が認められる場合には使用しないでください。

【形状・構造及び原理等】

本品は、子宮内精液注入手法において、精子を子宮内に注入するために用いられる単回使用のカテーテルである。

シャフト部には補強芯が具備する場合がある。

また、先端口は中央開口タイプと側孔開口タイプがある。

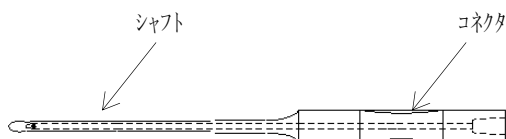

主な原材料

シャフト	エラストマー
コネクタ	エラストマー
補強芯	ステンレス

【使用目的又は効果】

子宮内精液注入手法において、精子を子宮内に注入するために使用する。

【使用方法等】

1. 1cc シリンジに装着し、調整済みの液を適量吸引します。
2. 膣鏡にて視野を確保し、カテーテルを頸管部から子宮腔内の範囲に於いて、状況を考慮し妥当と思われる部位迄挿入します。
3. 注入後 25 分前後安静の状態を保って下さい。

【使用上の注意】

1. 本品はディスポーザブル製品です。再滅菌、再使用は出来ません。
2. 各施設の責任の範囲に於いて調整、ご使用下さい。
3. 製品に無理に力を加えたり、加工したりする作業はやめて下さい。
4. 子宮頸管内及び子宮腔内で抵抗を感じたときは、決して無理に押し進めないで下さい。(出血や子宮内膜損傷などの有害現象が起こる可能性があります。)
5. 滅菌包装に破損または不具合が確認された場合、販売店または当社までご連絡下さい。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法
水漏れに注意し、高温・多湿な場所及び直射日光を避けて、清潔な状態で保管して下さい。
2. 有効期間
使用の期限は製品ラベルに記載(自己認証による)

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社サンキョーメディック
電話番号 (0545) 23-0678